




Illustration de la pompe MiniMed® 670G

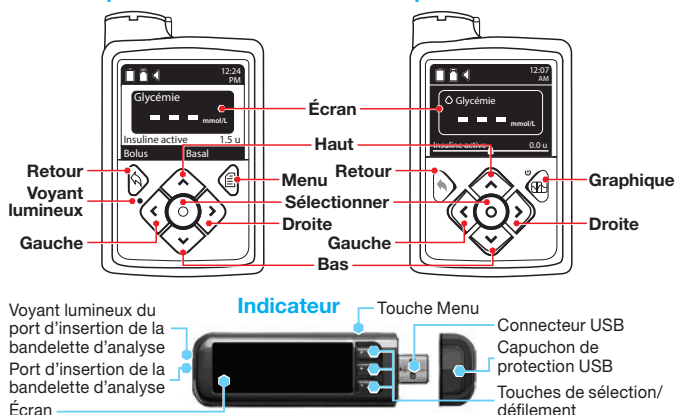

MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ



REMARQUE : Vérifiez les unités de mesure de votre indicateur. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'utilisation de votre lecteur.

Configuration initiale du indicateur CONTOUR®NEXT LINK 2.4 et connexion à la pompe à insuline MiniMed®

Chargement de l'indicateur



- Retirez le capuchon protecteur pour découvrir le connecteur USB.



L'indicateur CONTOUR®NEXT LINK 2.4 est muni d'une pile rechargeable permanente. Chargez votre indicateur en utilisant le chargeur mural* ou en branchant le connecteur USB dans un ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension. Votre indicateur affichera brièvement le message « Ne pas faire d'analyse – Recharge en cours », et l'éclairage de la fente d'insertion de la bandelette clignotera. **Vous ne pouvez pas effectuer d'analyse de glycémie durant le chargement de la pile.** Une fois la recharge terminée, l'éclairage de la fente d'insertion de la bandelette s'éteint. Débranchez votre indicateur CONTOUR NEXT LINK 2.4 pour effectuer une analyse.

Débrancher l'indicateur de la source de charge avant de commencer la configuration

- Pour commencer la configuration, maintenez le bouton Menu enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'indicateur s'allume.
- Faites défiler vers le bas pour sélectionner la langue. Appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur OK lorsque la langue désirée s'affiche. Appuyez sur NON si ce n'est pas le cas.

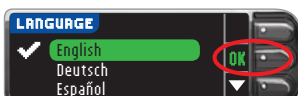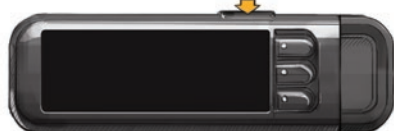

Connexion à la pompe


Les images d'écran de la pompe sont données uniquement à titre d'illustration et peuvent différer entre les pompes 630G et 670G.

- Connecter une pompe MiniMed? Appuyez sur OK.
- Sur la pompe, sélectionnez « Connecter appareil ». Appuyez sur OK.



Pour la pompe MiniMed 630G

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran. Appuyez sur la touche Menu. Si votre pompe n'a pas de touche Menu, passez à l'étape 7b.

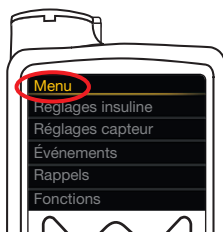

ou

Pour la pompe MiniMed 670G

- Appuyez sur la touche Sélectionner. Utilisez la flèche de défilement vers le bas pour faire défiler l'écran jusqu'à Options. Appuyez sur la touche Sélectionner.



Si rien n'apparaît sur l'écran de la pompe, appuyez sur une touche pour le réactiver.


- Utilisez la flèche de défilement vers le bas pour faire défiler l'écran jusqu'à Fonctions. Appuyez sur la touche Sélectionner. Dans le menu Fonctions, utilisez la flèche de défilement vers le bas pour faire défiler l'écran jusqu'à Choix des appareils. Appuyez sur la touche Sélectionner.



- Dans le menu Choix des appareils, faites défiler jusqu'à Connecter appareil. Appuyez sur le bouton Sélectionner.



- Placez l'indicateur et la pompe côte à côte. Sélectionnez Connexion automatique sur votre pompe.

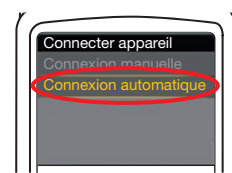

Sélectionnez Connexion auto. sur votre indicateur.




- Lisez l'écran de la pompe, en utilisant le bouton de défilement vers le bas pour faire défiler à la page suivante. Utilisez le bouton de défilement vers le bas pour faire défiler jusqu'à Continuer.




Appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Placez l'indicateur et la pompe côte à côte. Sélectionnez Rechercher sur la pompe.

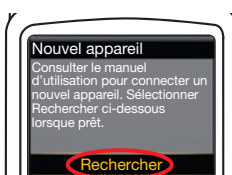

Sélectionnez Rechercher sur l'indicateur.

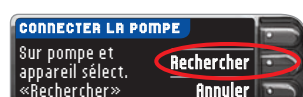


La recherche peut durer jusqu'à deux minutes.



- Vérifiez que le numéro (N°) de série du dispositif sur la pompe correspond au N° de série du dispositif sur l'indicateur. S'ils correspondent, faites défiler jusqu'à Valider sur l'écran de la pompe.



Appuyez sur le bouton Sélectionner.

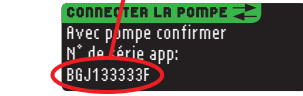

Une fois la pompe reliée à l'indicateur, le numéro de série sur l'écran de l'indicateur change. Il s'agit du numéro de série de la pompe.

- Tournez la pompe. Assurez-vous que le numéro de série au dos de la pompe correspond à celui maintenant affiché sur l'écran de l'indicateur.



Appuyez sur Suivant.



- Sélectionnez Toujours et appuyez sur OK à l'écran suivant.




- Sélectionnez le Format de la date.



- Appuyez sur OK. Remarque : Si l'heure et la date sont inexactes, vous devez les modifier sur la pompe.



- Appuyez sur Accepter pour sélectionner la fonction AutoLog désactivé.

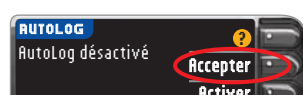


La fonction AutoLog vous permet de marquer le résultat d'une analyse de glycémie comme suit : À jeun, Avant repas ou Après repas. Pour en savoir plus, consultez le manuel de l'utilisateur.

Retournez la page pour terminer la configuration. ➡

* Le chargeur mural n'est pas toujours inclus dans les trousseaux. Communiquez avec le Service à la clientèle pour savoir comment en obtenir un.

19 Choisissez **Accepter** ou **Modifier** pour régler les alertes de glycémie haute ou basse. L'indicateur fait entendre un signal sonore lorsque votre glycémie se situe au-dessus ou au-dessous des paramètres choisis.

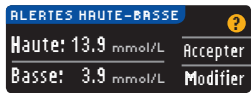


20 Choisissez **Accepter** ou **Modifier** pour régler les paramètres de l'intervalle cible. L'intervalle cible est l'objectif que vous avez fixé pour vos résultats d'analyse de glycémie.



REMARQUE : Les alertes ne peuvent être programmées qu'en dehors de l'intervalle cible choisi. Les valeurs cibles ne peuvent être programmées que dans l'intervalle entre les alertes. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle, dont les coordonnées figurent ci-dessous.

21 La configuration de votre ensemble pour la surveillance de la glycémie est terminée; vous pouvez maintenant effectuer une analyse. Rendez-vous à l'étape 1 ci-dessous.

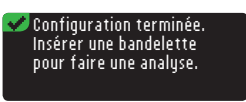

Matériel requis pour les analyses



Bandelette d'analyse CONTOUR®NEXT



Dispositif de prélèvement sanguin



Lancette



Indicateur de glycémie CONTOUR®NEXT LINK 2.4


⚠ MISE EN GARDE :

- Le dispositif de prélèvement sanguin est destiné à l'autosurveillance de la glycémie et ne doit servir qu'à un seul patient. Ce dispositif ne doit jamais être utilisé par plus d'une personne en raison du risque d'infection.
 - Utilisez une nouvelle lancette pour chaque analyse, car les lancettes usagées ne sont pas stériles.
 - Tous les éléments de cet ensemble sont considérés comme présentant un risque biologique et peuvent transmettre des maladies infectieuses, même après avoir été nettoyés et désinfectés.
 - Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon avant d'effectuer une analyse et de manipuler l'indicateur, le dispositif de prélèvement sanguin ou les bandelettes d'analyse, ainsi qu'après.
- Consultez le manuel de l'utilisateur pour les directives complètes sur la façon de nettoyer et de désinfecter votre indicateur.


Analyse de votre sang

Prélèvement d'une goutte de sang

1 Insérez la bandelette d'analyse et attendez que s'affiche le message **APPLIQUER LE SANG**.

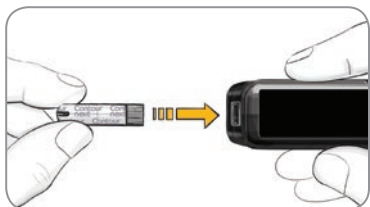


2 Retirez le bouchon du dispositif de prélèvement sanguin. Insérez fermement la lancette jusqu'au fond.

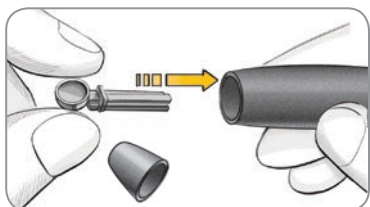

Les illustrations du dispositif de prélèvement sanguin ne servent qu'à titre de modèle. Il est possible que votre dispositif diffère quelque peu. Consultez le feuillet accompagnant votre dispositif de prélèvement sanguin pour des directives détaillées sur la préparation du dispositif de prélèvement sanguin.

3 Remettez le bouchon du dispositif. Réglez le bouchon à la profondeur de ponction désirée.

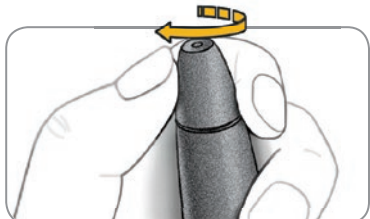

4 Prélevez une goutte de sang.



Analyse de glycémie avec la goutte de sang

5 Mettez l'extrémité de la bandelette d'analyse en contact avec la goutte de sang. Si la première goutte de sang est insuffisante, l'indicateur émettra deux signaux sonores consécutifs et affichera le message **QUANTITÉ DE SANG INSUFFISANTE**. Vous avez environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette.



REMARQUE : Si la fonction **AutoLog** est activée, on vous demandera de marquer votre résultat – **À jeun, Avant repas ou Après repas –**, avant que votre résultat ne s'affiche. Si le résultat de votre analyse est supérieur au paramètre d'alerte de glycémie haute ou inférieur au paramètre d'alerte de glycémie basse, le résultat s'affichera sans que vous ayez à choisir un marqueur.

Transmission des résultats à votre pompe MiniMed

6 Si vous avez sélectionné **Toujours** dans les **Options d'envoi** lors de la **Configuration**, les résultats seront envoyés directement à votre pompe. Si vous avez plutôt sélectionné l'option **Demander**, vous pouvez choisir d'envoyer ou non le résultat à votre pompe après chaque analyse.




Appuyez sur **Envoi: Oui** ou **Envoi: Non**.

ATTENTION : Vérifiez toujours votre pompe pour vous assurer que le résultat affiché correspond à celui fourni par l'indicateur.

Bolus, Rappel et Notes

7 Sélectionnez **Bolus** pour envoyer un bolus à votre pompe. Sélectionnez **Rappel** pour programmer un rappel en vue de votre prochaine analyse. Sélectionnez **Notes** pour ajouter des renseignements au résultat.

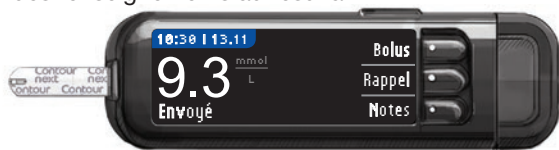

Confirmation que le résultat a été envoyé à la pompe

8 Récupérez votre pompe. Maintenez enfoncé le bouton **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil. Le résultat de votre analyse devrait s'afficher à l'écran de la pompe.



Mise hors tension de l'indicateur

9 Retirez la bandelette. L'indicateur s'éteindra après trois secondes. Vous pouvez aussi maintenir le bouton **Menu** enfoncé pour éteindre l'indicateur.



Pour des instructions complètes, consultez votre manuel d'utilisation de CONTOUR NEXT LINK 2.4, la notice d'utilisation du dispositif de prélèvement sanguin et le manuel d'utilisation de la pompe MiniMed. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.diabetes.ascensia.com ou communiquez avec le Service à la clientèle au 1-800-268-7200.

IVD Pour épreuves diagnostiques *in vitro*



Fabriqué pour :
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Bâle, Suisse

Pour obtenir des informations sur les brevets et les licences associées, consulter le site : www.patents.ascensia.com

Medtronic

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo No Coding (Aucun étalonnage) sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

TM see/MC voir www.ascensia.diabetes.ca/tm-mc
www.diabetes.ascensia.com

Medtronic, le logo Medtronic et MiniMed sont des marques de commerce de Medtronic.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.